



ハロゲンランプ交換方法



- 1、通常開いている絞りの羽を完全に閉じた状態にし
絞り側面上部のネジ2つを、ドライバー(もしくは手で回せる)で外し
板状のカバーを真上に引き上げ手前に倒す。
- * スイッチの配線があるため注意。

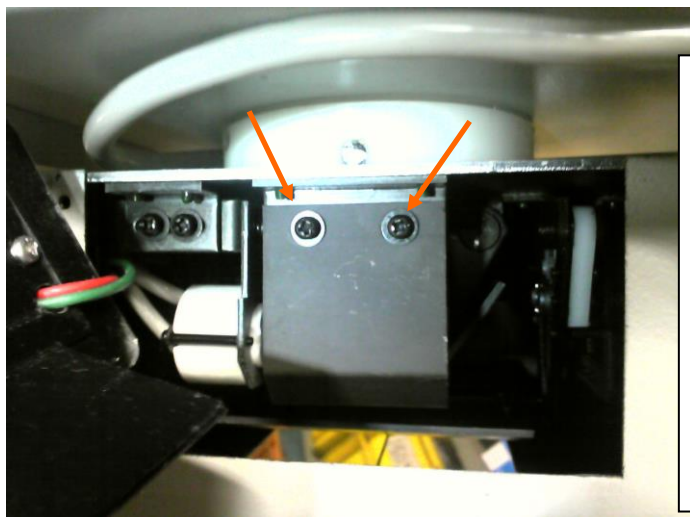

- 2、ハロゲンの黒いカバーのネジ2本を緩めカバーを外す。
- * ネジを落とさないように注意

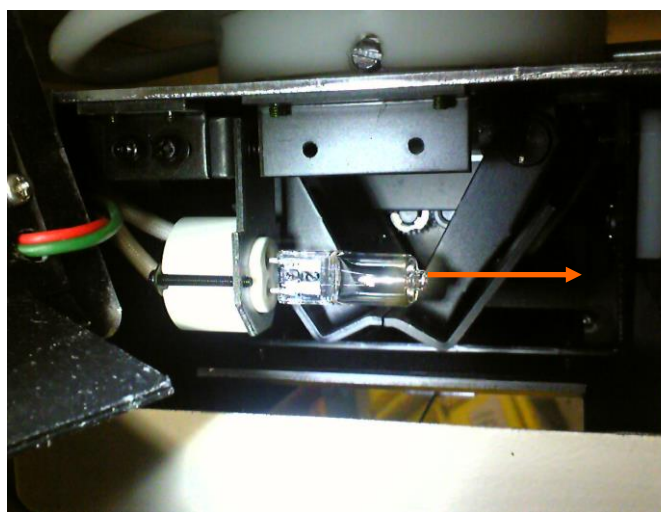

- 3、切れたハロゲンランプを右へ引き抜く。
新しいハロゲンランプを足2本が出た状態にビニールを切り、ガラス部を素手で触らないように差し込む。
ズれる場合があるので正確に、入ったか確認する。
- * 足側のビニールを切り、足のみを出してガラス側はビニールが付いたままで差し込む。
- * 2, 1の手順で組み立てる。
* ハロゲン球の足をもとの場所にしっかりと差し込まないと照射野とのズレが発生いたします。

* 絞りの形は機種によって異なりますが、基本的な構造は同じです。